


## PROTOKÓŁ CHIRURGICZNY

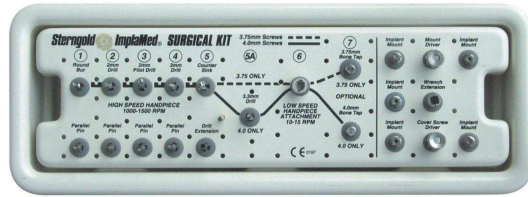

Kaseta chirurgiczna z instrumentami

## PROTOKÓŁ CHIRURGICZNY



1. Zaznacz punkt wprowadzania implantu używając wiertła do trepanacji (nr 905091), w kasecie nr 1



2. Zastosuj wiertło 2.0mm, nr 2 w kasecie




3. Zastosuj wiertło pilotujące 2.0mm, nr 3 w kasecie, którym należy poszerzyć wejście dla wiertła 3.0mm



4. Użyj wiertła 3.0mm, nr 4 w kasecie




5. Użyj wiertła Counter Sink, nr 5 w kasecie, aby przygotować nacięcie na główkę implantu

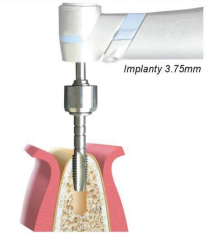


5a. Jeśli kość jest dość twarda i zwrta użyj gwintownika 3.75mm, nr 7 w kasecie

Uwaga: Najpierw gwintownik należy umieścić w nasadce - nr 6 w kasecie, a tą w kątnicy

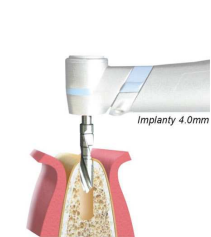

6. Użyj wiertła 3.3mm, nr 5A w kasecie

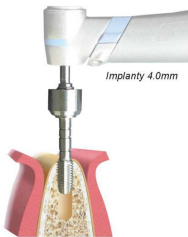


6a. Jeśli kość jest dość twarda i zwrta użyj gwintownika 4.0mm, nr 7 w kasecie

Uwaga: Najpierw gwintownik należy umieścić w nasadce - nr 6 w kasecie, a tą w kątnicy



7. Wprowadź implant wytrawiany kwasem używając Stern Twist

Jeśli kość jest twarda patrz: 7a-7g

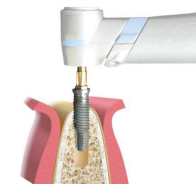

7a. Przenieś implant i częściowa wprowadź go




7b. Zdejmij Stern Twist



7c. Załóż nasadkę do kątnicy, nr 6 w kasecie



7d. Dokręć do główki implantu prowadnicę implantu (Implant Mount). Użyj w tym celu śrubokręta Mount Driver z dużym zewnętrznym heksagonem.

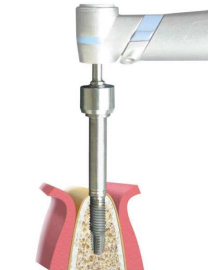


7e. Wepnij prowadnicę do nasadki. Wprowadź implant tak, aby główka pogryzła się w kości.




7f. Aby upewnić się, że implant został wprowadzony prawidłowo można zdjąć kątnicę z nasadką i za pomocą klucza z zapadką dokręcić implant.



7g. Przytrzymaj prowadnicę kluczem otwartym i odkręć prowadnicę śrubokrętem.

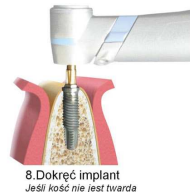

8. Dokręć implant  
Jeśli kość nie jest twarda

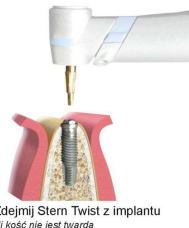

9. Zdejmij Stern Twist z implantu  
Jeśli kość nie jest twarda



10A. Zabieg jednoetapowy  
Zamiast śruby kryjącej nakładamy łącznik zablizniający. Zaszwywamy śluzówkę tak, aby część górna główki wystawała ok. 2.0mm powyżej śluzówki



10B. Zabieg dwuetapowy.  
a. wprowadzono implant o powierzchni wytrawionej kwasem; załóż śrubę zamykającą, użyj w tym celu Stern Twist



b. wprowadzono inny implant, użyj śrubokręta o małym zewnętrznym heksagonie, w kasecie oznaczony jako Cover Screw Driver



11. Zaszwyw śluzówkę



12. Po upływie 3 m-cy dla zuchwy, a 6-7 dla szczęki można przeprowadzić II etap zabiegu chirurgicznego. Należy naciąć śluzówkę i w miejsce śruby założyć łącznik zablizniający.

Uwaga: Przy wydawaniu pacjentowi protezy należy bezwzględnie odciążyć miejsca, w których implant został wprowadzony.